

Tratamentul plăgilor de la HARTMANN

*Soluția
pentru orice
plăgă!*



HidroTerapia

Adaugă dinamică procesului de vindecare a plăgilor



Succes
în doi
pași!



HidroTerapia
Eficiență și simplitate.



200
ANI

HydroClean[®] advance



Curățare și activare Etapa 1

- Pansament **hidro-reactiv** cu polimer super-absorbant, impregnat cu soluție Ringer
- Primul pas în aplicarea Hidro**Terapiei**




HydroClean[®] advance




Cum funcționează?


Mecanism unic de clătire-absorbție

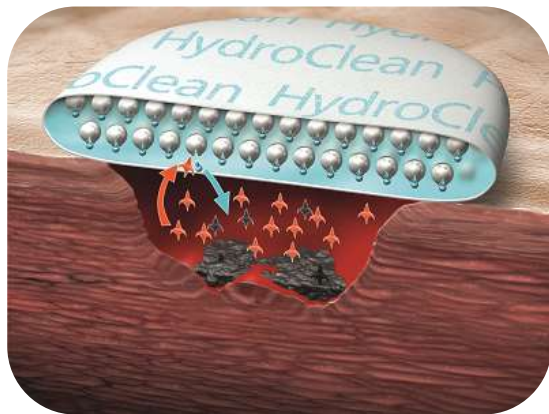

Eliberarea continuă a soluției Ringer

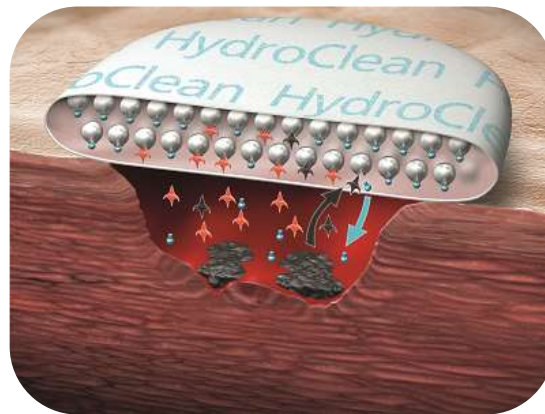

Absorbția particulelor de fibrină sau necrozate, a bacteriilor și a exsudatului în exces

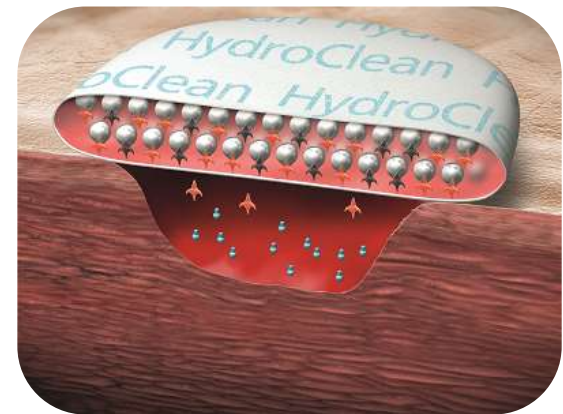

Mentținerea mediului umed în plagă, propice procesului de vindecare




**Protejare și stimulare
Etapa 2....**

- Pansament **hidro-reactiv** din spumă poliuretanică, cu Tehnologie unică AquaClear Gel
- Al doilea pas în aplicarea Hidro**Terapiei**




Cum funcționează?


Reglarea mediului umed în plagă

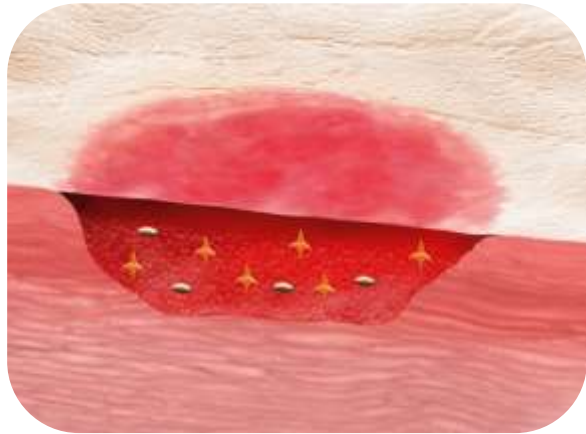

Epitelizarea depinde de factorii de creștere. Factorii de creștere stimulează proliferarea și migrarea cheratinocitelor.

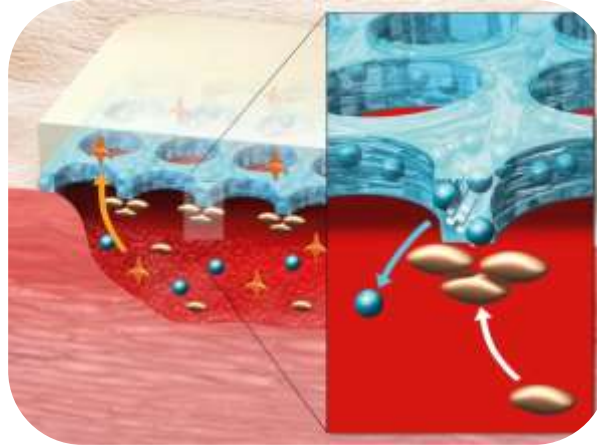

HydroTac reglează mediul umed în plagă. Absoarbe exsudatul în exces. Eliberare activă a umidității.

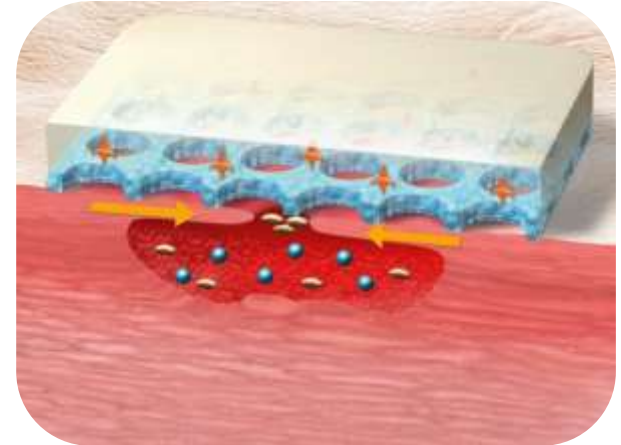

Cu tehnologia HydroTac – cu până la de trei ori mai mulți factori de creștere. Concentrația ridicată contribuie la epitelizarea rapidă.

HidroTerapia

Indicații

3


Plăgi cronice

Escare
Ulcere
varicoase
Picioar diabetice




Plăgi acute

Plăgi post
intervenții chirurgicale suturate
Arsuri
Tăieturi minore
Zgârieturi
Julituri

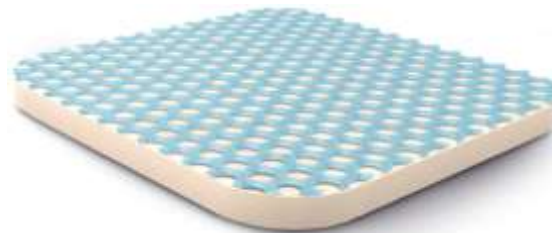

Vivano[®] Tec Pro

Soluția avansată în tratamentul plăgilor complexe

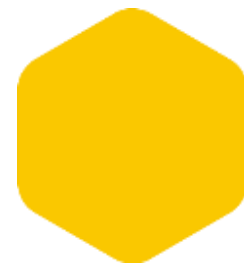

200 ANI

Vivano®


Beneficiile terapiei cu presiune negativa



Stimulează proliferarea
celulară/apropierea
marginilor plăgii

Reduce edemul
celular

Menține mediul
umed în echilibru

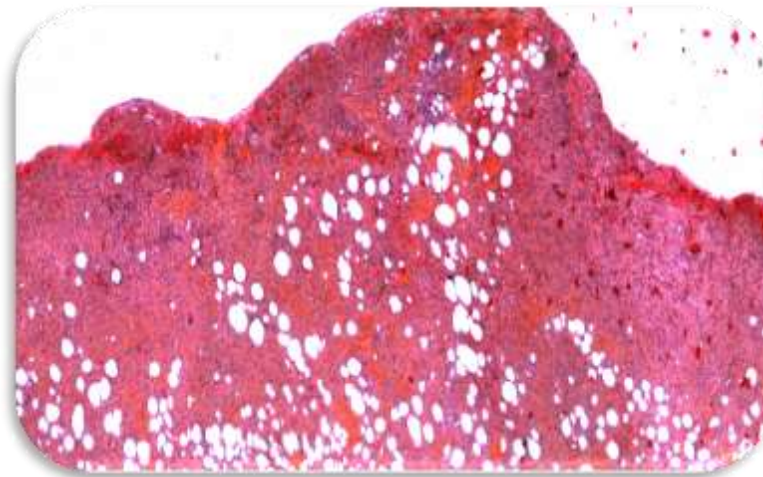

Stimulează formarea
țesutului de granulație

Stimulează dezvoltarea
vascularizației locale

Îndepărtarea continuă a
exsudatului/ materialului
infecțios are loc în mediu etanș

Vivano®

Indicatiile TPN

Plăgi cronice sau acute ce nu pot fi tratate prin tratament de vindecare primară, cum ar fi:

- Plăgi cu vindecare secundară
- Plăgi dehiscente
- Ulcer de presiune
- Sindromul piciorului diabetic
- Transplant de piele și țesut
- Plăgi ortopedice greu de vindecat
- Abdomen deschis
- Plăgi traumatice și arsuri
- Plăgi după fasciotomie....



Vivano®

Contraindicatii

Este contraindicată utilizarea la pacienții cu:

- Plăgi tumorale maligne
- Fistule non-enterice sau neexaminat
- Osteomielita netratată
- Țesut necrozat



Unitatea cu presiune negativă Vivano Tec Pro nu trebuie aplicată direct peste nervi expuși, organe, zone de anastomoză, vase de sânge sau organe.



Masuri speciale de precautie

- Pacienții cu sângerare acută, tulburări de coagulare sau administrarea de anticoagulante
- Răni ischemice, unde presiunea negativă poate bloca capilarele adiacente marginii răni
- La pacienții cu răni circulare
- În vecinătatea nervului vag
- La pacienții ce urmează să facă RMN, terapie cu oxigen hiperbaric, defibrilare
- Dacă rana are margini ascuțite (fragmente de os) sunt prezente în plagă

Vivano®Med kit – tot ce aveți nevoie într-un singur pachet



Vivano®Tec Port

- Subțire și flexibil
- Fixare perfectă chiar și în zonele dificil de pansat (ex. plagă plantară)



Vivano® Med Foam

- Dezvoltă țesutul de granulație și asigură o îndepărtare ușoară și fără durere
- Disponibil în varianta compactă cât și pretăiat pentru o aplicare facilă

Hydrofilm®

- Adezivitate bună și sigilare sigură, potrivit în terapia cu presiune negativă



Un pas înainte
pentru sănătate

200
ANI

Vă mulțumim
pentru atenție!